


Memodrop

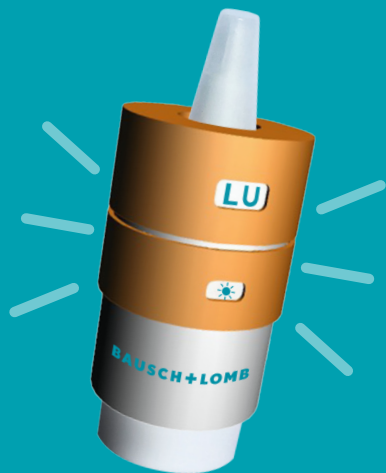


Pour en savoir plus sur votre pathologie
et mieux la comprendre, scannez le QR
code ci-contre.

25 04 MEMO BRO GP 001

GLAUCOME

Memodrop

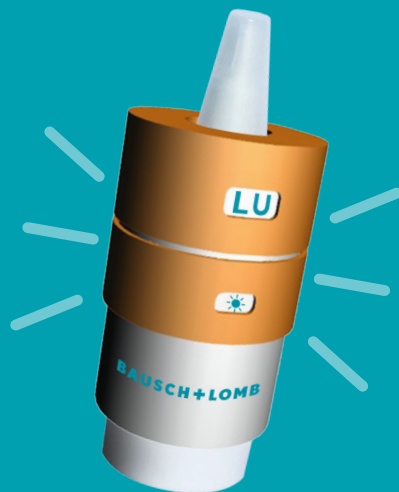

Notice d'utilisation (non promotionnelle)
relative au bon usage de votre flacon.

BAUSCH+LOMB

BAUSCH+LOMB

Parce qu'on peut **facilement oublier** de prendre son traitement ou ne plus se rappeler si on l'a pris, et qu'il est **essentiel de le suivre** pour préserver sa vue. **Memodrop** permet de suivre jour après jour la prise correcte de son traitement.

Avant la 1^{ère} utilisation

1. Je place

directement
Memodrop sur
le flacon de
collyre.



2. Je tourne la bague du bas sur :



si mon traitement
doit être pris le **matin**
selon l'ordonnance de mon médecin.

ou



si mon traitement
doit être pris le **soir**

En cas de doute, demandez à votre médecin, pharmacien ou consultez la notice.

Tous les jours

1. Je pousse

sur le fond du flacon
pour prendre mes
gouttes.



2. Je tourne

la bague du haut
pour afficher le jour
de la prochaine prise
(exemple : **LU** → **MA**).



Memodrop est un dispositif réutilisable. Retirez-le une fois le flacon terminé. Il suffit ensuite de le nettoyer à l'eau savonneuse, de le laisser sécher, puis de le fixer sur le nouveau flacon de collyre.